

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 医療用スポンジ JMDN コード：13695000

再使用禁止

眼科用吸水スポンジ ロートアイスピア

【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

眼の各組織上の水分や体液等を吸収する二等辺三角形のスポンジに細い棒（柄）が取り付けられている。

〈形状〉

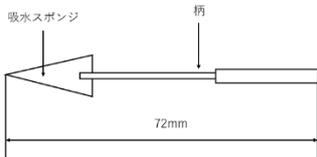

〈原材料〉

スポンジ：ポリビニルアセタール

柄：ポリプロピレン

〈原理〉

吸水スポンジが水分や体液等を吸収し、除去する。

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置の際、眼の各組織上の水分や体液等を吸収し、除去する。

【使用方法等】

眼科手術・処置の際、柄を持ち、吸水スポンジの先端を眼の各組織に当て吸水等を行う。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

スポンジは、術中、乾燥状態にある部位に使用しないこと。

[組織を傷つけるおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

1. 水濡れ及び直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
2. 包装に傷を付けたり、ピンホールを生じさせたりしないように保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ロートニッテン株式会社

〒457-0038 名古屋市南区桜本町40番地の2

TEL：052-822-5512（代表）

〈製造業者〉

セネフォーム社（Cenefom Corporation）

国名：台湾