

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ JMDN コード：13695000

再使用禁止

ロートアイウィック

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

眼の各組織上の水分や体液等を吸収する細長いスポンジである。

〈形状〉

原材料：ポリビニルアセタール

〈原理〉

吸水スポンジが水分や体液等を吸収し、除去する。

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置の際、眼の各組織上の水分や体液等を吸収し、除去する。

【使用方法等】

眼科手術・処置の際、事前に生理食塩水や精製水等の液体で十分に湿らせ、眼の各組織に当て吸水等を行う。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 乾燥した状態で使用しないこと。[組織を傷つけるおそれがある。]
- 術中、眼の近くで切らないこと。[欠片が患者の創口に入り、異物反応を引き起こすおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 水濡れ及び直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管すること。
- 包装に傷を付けたり、ピンホールを生じさせたりしないように保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ロートニッテン株式会社
〒457-0038 名古屋市南区桜本町40番地の2
TEL：052-822-5512（代表）

〈製造業者〉

セネフォーム社（Cenefom Corporation）
国名：台湾